



## Laboranweisungen ↓

Bereiten Sie die Capitainer®B Probenkarte wie folgt vor:



1 Drehen Sie die Karte so, dass die Abziehlaschen auf der Rückseite sichtbar sind.



2 Ziehen Sie die Laschen ab.



3 Führen Sie ein spitzes Werkzeug, z.B. eine Pinzette, unter die Papierscheibe ein.



4 Entfernen Sie vorsichtig die Papierscheibe



5 Legen Sie die Scheibe in einen Behälter Ihrer Wahl, z.B. eine Mikrotiterplatte, für die anschließende Elution.



6 Die qDBS Probe ist nun bereit für die Analyse.



Capitainer AB  
Norr Mälarstrand 54  
SE-112 20 Stockholm SWEDEN  
info@capitainer.se

capitainer.se